

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/narkotest-drugcheck-3000-drager-p-5940.html>



## Narkotest - DrugCheck 3000 -drager

Cena brutto	<b>2 846,22 zł</b>
Cena netto	<b>2 314,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o termin realizacji</b>
Numer katalogowy	<b>83 25 580</b>
Producent	<b>Dräger</b>

### Opis produktu

#### DrugCheck 3000

- opakowanie zawiera 20 sztuk testów,
- wykrywa 5 grup substancji,
- wykrywa następujące substancje:
  - Kokaina (COC)
  - Opiaty (OPI)
  - Konopie indyjskie (THC)
  - Amfetamina (AMP)
  - Metamfetamina (MET)

- cena podana za opakowanie.

**Test Dräger DrugCheck® 3000 pozwala sprawdzić w ciągu kilku minut czy dana osoba zażywała ostatnio narkotyki określonego typu.**

**Kompaktowy i szybki test narkotykowy bazujący na ślinie pozwala uzyskać niezawodne wyniki w prosty i niedrogi sposób. Zestaw do nieinwazyjnych testów narkotykowych nie wymaga zasilania elektrycznego i może być używany w dowolnym miejscu.**

**Proste i bezpieczne pozyskiwanie próbek do testu narkotykowego**

**Test Dräger DrugCheck 3000 składa się z dwóch elementów:**

- ze zbiorniczka ze środkiem pochłaniającym do pobierania próbki śliny
- oraz kasety testowej do analizy - Kasetka testowa zawiera ciecz buforową i okienko z dwoma paskami, które wyświetla linie kontrolne i testowe.

**Sam test jest przeprowadzany w trzech prostych etapach:**

- pobranie wacikiem próbki śliny,
- wstrząśnięcie zestawem testowym,
- odczekanie na krótki okres inkubacji i rozpoczęcie testu.
- Wskaźnik koloru na waciku znika zaraz po wchłonięciu wystarczającej ilości śliny do przeprowadzenia testu.

Wyniki można odczytać od razu po pojawieniu się linii kontrolnych w okienku.

Jeśli wynik badania jest negatywny, obok odpowiedniej klasy substancji (narkotyku) pojawi się linia.

Oznacza to, że substancja docelowa nie została wykryta w próbce.

Jeśli linia nie pojawi się obok jednej z klas substancji, oznacza to, że wynik dla tej substancji jest pozytywny.

#### Szybka i czuła analiza

Test Dräger DrugCheck 3000 pozwala przeprowadzić badanie na obecność maksymalnie sześciu klas substancji jednocześnie, tj. kokainy, opiatów, amfetaminy, metaamfetaminy i narkotyków syntetycznych (np. Ecstasy, MDMA), benzodiazepin (np. leków na receptę) i konopii indyjskich (THC). Spośród wszystkich wymienionych klas substancji konopie indyjskie należą do najczęściej używanych narkotyków i są również najtrudniejsze do zidentyfikowania (THC). Dlatego właśnie test Dräger DrugCheck 3000 zoptymalizowano pod kątem wykrywania THC, tak więc teraz oferuje on dwie opcje pomiaru: w zależności od wybranego czasu oczekiwania (inkubacja wstępna) dla testu dostępna jest opcja szybka z wyższą wartością graniczną stężenia THC i opcja czuła z niższą wartością graniczną stężenia tej substancji. Całe badanie trwa tylko od 3 do 5 minut.

#### Jednoznaczne wykrywanie narkotyków na miejscu

Niewielkie, kieszonkowe rozmiary sprawiają, że test DrugCheck 3000 da się z łatwością przenosić. Można go szybko i łatwo przygotować do

---

użycia, a ponadto nadaje się on do zastosowań wymagających elastyczności użytkownika, takich jak kontrole drogowe i testy w miejscach pracy, w których wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa\*. Zestaw testowy nie ma części elektrycznych, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować w obszarach niebezpiecznych, a także w punktach opieki zdrowotnej.

### **Aplikacja Dräger® DrugCheck: wygodniejsze i wydajniejsze wykrywanie narkotyków**

#### **Skanujesz, testujesz i zapisujesz dane:**

- mobilna rejestracja danych z użyciem smartfona jest tak prosta.
- Nowa aplikacja Dräger DrugCheck® pozwala zeskanować, przeanalizować, zapisać i zarchiwizować wynik testu w kilku prostych krokach.
- Instrukcja wideo przejrzystie tłumaczy, jak obsługiwać urządzenie DrugCheck 3000, analizować wynik testu za pomocą kamery w smartfonie i zapisać ten wynik do późniejszego wykorzystania.
- Wyniki trafiają do dziennika razem z danymi osoby testowanej i osoby testującej oraz informacjami takimi jak data, godzina i lokalizacja geograficzna.
- Wygenerowane raporty z testów są zapisywane w pamięci, w której można je później odszukać.
- Zaszifrowane dane można szybko i łatwo przesłać za pomocą smartfona.
- Dzięki temu wydawanie na odległość dyspozycji dotyczących działania na podstawie uzyskanych wyników nie sprawia żadnego problemu.
- „Obszar informacyjny” zapewnia bardziej szczegółowe odpowiedzi, np. na temat prowadzenia testów na obecność narkotyków za pomocą urządzenia DrugCheck 3000.
- Aplikację DrugCheck na urządzenia z systemem iOS lub Android można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store lub Google Play.
- Sprawdź kompatybilność aplikacji z Twoim urządzeniem mobilnym.

## Dane Techniczne

### Zasada pomiaru